

NIMO

CHAISE DE BAIN




EQUIPEMENT STANDARD



- 1** Revêtement en matériau spacer antibactérien, amovible et lavable en machine pour une hygiène optimale. Structure en acier inoxydable thermolaqué, durable et résistante à la corrosion.
- 2** Multifonctionnalité : Le berceau se détache facilement pour une installation directe et sécurisée dans la baignoire.
- 3** Inclinaison dans l'espace : Permet le repositionnement et la gestion des points de pression conformément aux recommandations cliniques.
- 4** Confort et sécurité : Équipé d'une ceinture abdominale 4 points, d'accoudoirs rembourrés et d'une ouverture pour un maintien sécurisé.
- 5** Commode facilement amovible : Convient à un plus large éventail de patients sans adaptations sur mesure.
- 6** Réglable : Le chariot de base offre 100 mm de réglage en hauteur. Les accoudoirs et le repose-pieds réglables le rendent adaptable à différents usages tout en garantissant sécurité, confort et gestion de la pression.

DIMENSIONS

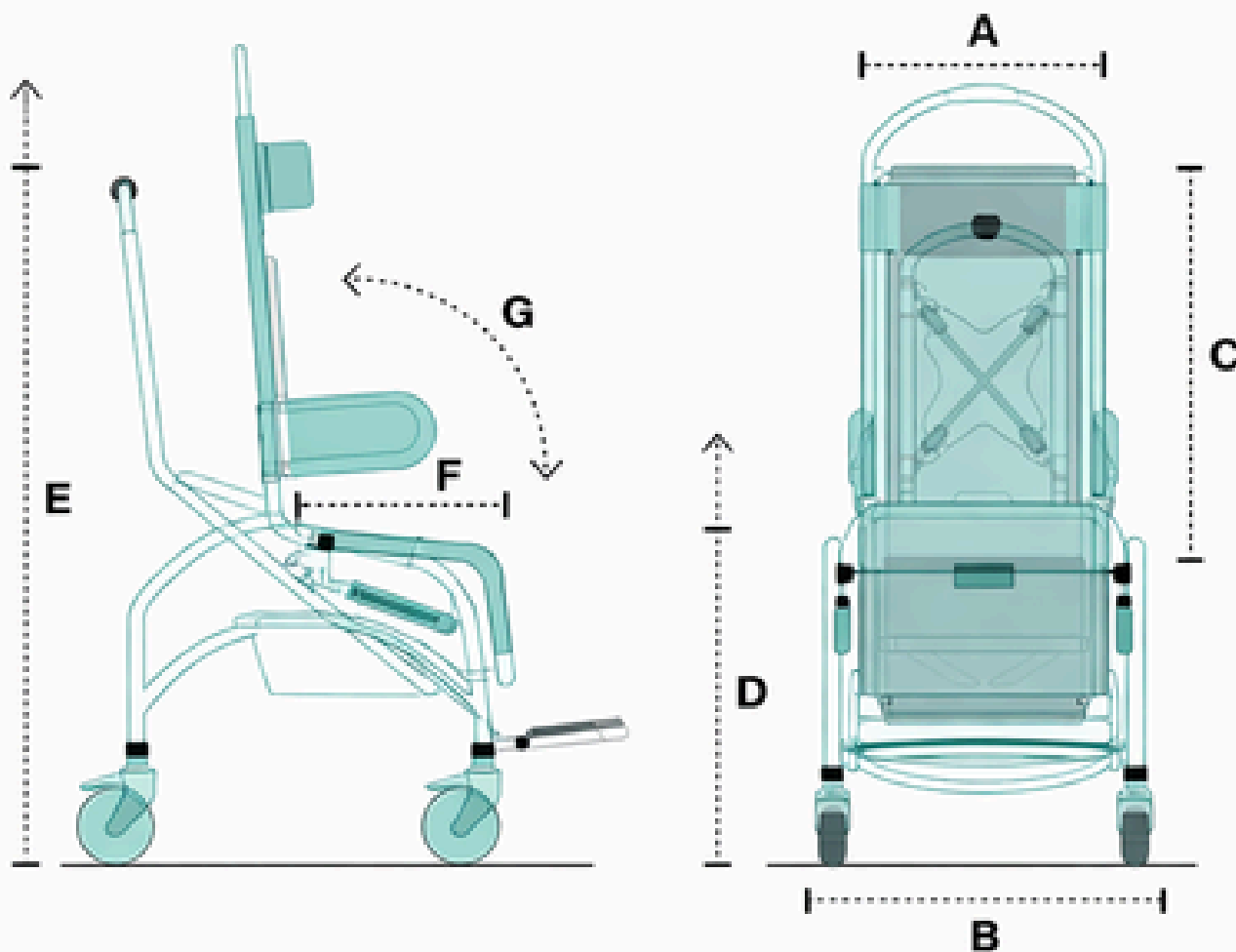

Mesure	Taille 1	Taille 2
A Largeur d'assise	299mm	399mm
B Largeur totale	519mm	519mm
C Longueur du dossier	510mm	640mm
D Hauteur d'assise	600mm - 700mm	600mm - 700mm
E Hauteur totale	1228mm - 1326mm	1228mm - 1326mm
F Profondeur d'assise	275mm	300mm
G Angle d'inclinaison	45°	45°

Charge maximum d'utilisation : 63,5Kg

PRINCIPES D'UN POSITIONNEMENT CLINIQUE EFFICACE



Charger le patient

Assurez-vous que tout le patient est en contact avec la chaise afin de redistribuer la pression exercée sur les zones osseuses.
N'oubliez pas de charger les pieds ! 19 % du poids du corps passe par les pieds.



Assurer un soutien postural

Tenir compte des déviations fixes et corriger les déviations flexibles afin de garantir le confort et le soutien lors des soins d'hygiène et de la douche, et d'éviter une redistribution inégale de la pression.



Repositionnement efficace

Il permet aux soignants d'avoir un meilleur accès pour les soins d'hygiène et la douche, ce qui contribue à offrir un plus grand confort au patient.



Surface appropriée

Matériau ajouré amovible, lavable en machine et doté d'un revêtement antibactérien, facilitant le maintien de la propreté et de l'hygiène par les soignants.
De plus, l'acier inoxydable avec revêtement par poudre garantit durabilité et résistance à la rouille.

ACCESSOIRES



Appuie-tête



Plot d'abduction
Carré



Ceinture
de sécurité



Acoudoirs
amovibles



Plot d'abduction
Rond



Harnais
de poitrine